

ЛАКАЛУТ ДЕНТ
за забни протези
Упатство за употреба

Пред употреба на медицинското помагало внимателно прочитајте го упатството, бидејќи содржи важни информации за вас.

ТАБЛЕТИ ЗА ЧИСТЕЊЕ
Медицинско помагало

Ова медицинско помагало се издава без рецепт. И покрај тоа, Лакатут дент таблетите за чистење, треба да го употребувате внимателно за да ви биде што повеќе од корист.

Носител на одобрението за ставање на медицинското помагало во промет во РМ

Натусана Македонија
ул. Качанички пат бр. 174
МК-1010 Скопје
www.natusana.mk

Производител

Dr. Theiss Naturwaren GmbH,
Michelinstrasse 10,
D-66424 Homburg, Германија
www.naturwaren-theiss.de

Фармацевтска форма и содржина

32 таблети (блистер 4 x 8)/кутија

Подрачје на примена

За надворешна употреба.

За интензивно чистење на забни протези. Сината боја на водата ќе избледува се додека трае чистењето.

Состав

Калиум кароат, натриум карбонат, лимонска киселина, гликоза, VP/VA кополимер, натриум лаурил сулфат, натриум лаурил сулфоацетат, арома, CI 73015.

Мерки за претпазливост и посебни упатства

Не се потребни посебни мерки на претпазливост, доколку Лакалут дент таблетите за чистење на протези се користат соодветно.

Концентрирано средство за чистење на забни протези!

Да се користи само надвор од устата.



Начин и времетраење на употребата

Една таблета за чистење треба да се стави заедно со забната протеза во чаша и да се наполни со млака вода до ниво над забната протеза.

Таблетата брзо се раствора, прави силни меури од ослободениот активен кислород и брзо ги отстранува остатоците и наслугите од забната протеза. По околу 15 - 20 минути, забната протеза е темелно исчистена, хигиенски уредна со свежина на ментол.

Важна информација

Пред внесување во растворот за чистење, забната протеза треба темелно да се исплакне под млаз вода.

Забната протеза може да се остави и преку ноќ во растворот за чистење.

Чување и рок на употреба

Да се чува на места достапни за деца!

Да се чува на температура максимум до 25° С.

Таблетите за чистење забни протези не смее да се употребуваат по датумот на истекот на рокот на употреба наведен на кутијата/блистерот.

Начин на издавање

Медицинското помагало може да се издава без рецепт во аптеки и специјализирани продавници.

Датум на последна ревизија на информациите

Мај 2014

